

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT Sitzringe werden ausschließlich von der Firma KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



SPEZIAL-KISSEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Sitzring

Kaltschaumkissen mit Aussparung



KUBIVENT.◇

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Der **KUBIVENT Sitzring** unterstützt ein angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten sowie die Entlastung bei Hämorrhoiden. Der Sitzring eignet sich zum Einsatz nach Operationen im Dammbereich oder während bzw. nach einer Schwangerschaft. Die Anwendung ist auch auf Toiletten bzw. Toilettenstühlen möglich.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Der Sitzring enthält eine Aussparung in der Mitte, die ein Freilagern des Sakralbereichs ermöglicht. Das Kissen dient bei vorübergehenden Schädigungen der Haut- /Weichteile im Sakral-/Beckenbereich (z. B. nach *Verletzung, Operation oder Entzündung*) zur kurzzeitigen Entlastung des Sakralbereiches.¹⁾

Empfehlenswert ist der Sitzring bei allen prophylaktischen Maßnahmen und konservativen Behandlungsmethoden rund um:

- Steißbeinprellungen und Frakturen,
- perianale Entlastung bei Hämorrhoiden und
- nach Enddarmoperationen.

Grundsätzlich sollte der Einsatz des Kissens von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Dieser wird als Zubehör angeboten.

Sitzunfähigkeit

Bei Sitzunfähigkeit wird der Einsatz nicht empfohlen.

Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Kissen.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Höhe/Ausführung	8 cm
Einsatzbereich	bis 100 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln, Stühlen, Toiletensitzen oder Toilettenstühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (z. B. *Anpassung der Armstützen des Rollstuhls*). Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass die offene Bezugsseite nach unten weist. Dabei zeigt die gewölbte Schaumstoffseite nach oben.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt Sitzring 8 cm



Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

¹⁾Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Kissengrößen und Gewichte				Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge	
Artikel-Nr.	Größe	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Kaltschaum	Raumgewicht 70 kg/m ³ , Stauchhärte 8,0 kPa
SR4515	45 x 8 cm	45 cm	15 cm	Bezug	Frotteebezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Kissen erfolgt regelmäßig mit dem Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Kissen sollte der Kissenkern/der Bezug vollständig trocknen.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Kissenkern

- Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Frotteebezug

Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet bis 60°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen und wirkt ein. Bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Sitzring mit Frotteebezug
1x Sitzring 45 x 8 cm (Kissenkern)
1x Frotteebezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung