

Reinigungs- und Pflegehinweise für die KUBIVENT Kiddy Matratze

Einzelne Würfel waschen	Waschmaschine bis 60 °C	ja
	Spezialreinigung durch KUBIVENT	ja
Komplettreinigung	Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)	nein
	Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)	ja
	Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen	ja
Bezug (bzw. Unterbezug)	waschbar bei	95 °C
	trocknergeeignet	nein
Inkontinenz-Schutzbezug	kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar	ja, optional
	trocknergeeignet	ja, optional

Reinigung der Kiddy-Matratze durch KUBIVENT

Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplettgereinigt werden. Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT ♦

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 071 81 / 47 50 6 - 99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 07/2018



Gebrauchsanleitung

KUBIVENT Kiddy




Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage



Würfelentnahme zur zusätzlichen Druckentlastung

Empfohlen wird, durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite der Matratze betroffene Körperstellen zusätzlich zu entlasten (siehe S.2).

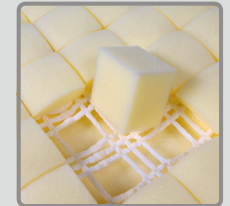

Therapie +
Prophylaxe

Braden
allgemein -hoch

Made
in *Handarbeit*
Germany

KUBIVENT ♦

Indikationen und Einsatzbereiche

Geeignet und empfohlen ist der Einsatz der Matratzen

- ◇ im Bereich der kindgerechten Versorgung in der Decubitus-Prophylaxe und -Therapie sowie bei den damit verbundenen Schlafstörungen und Schmerz-situationen.
- ◇ Sie unterstützen die Prophylaxe bei einem allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden,).
- ◇ Ebenso unterstützen sie bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Therapie bei bereits bestehenden Decubiti (bis einschließlich Stadium II). Allerdings muss der Einsatz der Matratzen **von geschultem Fachpersonal eingeschätzt und die entsprechende Anpassung (Würfelenahme)** in diesem Zuge erklärt und vorgenommen werden.
- ◇ Die Matratze ist geeignet für Versorgung bei Kindern mit maximal 50 kg Körpergewicht. Bei höhergewichtigen Patienten fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhandelspartner nach der entsprechen- den kindgerechten Lösung.



12 cm – zweischichtig

Anwendungseinschränkungen

- ◇ Die Matratzen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden.
- ◇ Beim Einsatz der Matratzen sind die **Gewichtsvorgaben unbedingt zu beachten:**

Höhe/Ausführung	12 cm
Einsatzbereich	bis 50 kg

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Würfelenahme zur zusätzlichen Druckentlastung

Empfohlen wird durch gezielte Würfelenahme auf der Unterseite der Matratze betroffene Körperstellen zusätzlich zu entlasten. Zu beachten ist dabei, dass die Entnahme schachbrettartig erfolgt (siehe Abb.) und nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden. Die Matratze wird sonst durchgelegen, und die druckentlastende Wirkung geht verloren.

Allergien


Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden als Steckklaken und in den passenden Größen als Zubehör angeboten. Fragen Sie einfach Ihren Fachhändler.

Gewichtsbeschränkungen

Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Matratzen. Nur so kann vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratzen durchgelegen wird oder bei zu leichten Patienten die Matratze zu hart ist.

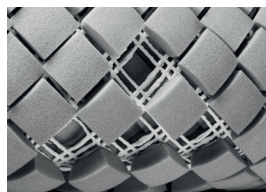

Sachgerechte Anwendung und Wirkungsweise

- ◇ Die Matratzen sind für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet. Damit Sie die Matratze richtig ins Bett einlegen können, ist die Oberseite mit einem speziellen Aufkleber gekennzeichnet.
- ◇ Entsprechend der extremen Sensibilität von Schmerzpatienten wurde hier eine Matratze aus zwei Komponenten entwickelt, die neben der allgemeinen Schmerzlinderung auch eine partielle, zusätzliche Druckentlastung ermöglicht.
- ◇ Die obere Schicht besteht aus einem speziellen Weichschaumstoff, der sich dem Körper anpasst und so den Schmerz nimmt.
- ◇ Die untere Schicht besteht aus einer einlagigen Würfelschicht, die sich aus einzelnen 5 x 5 cm großen Würfeln zusammensetzt. An den von Druck- oder Schmerzspitzen betroffenen Stellen können einzelne Würfel zur Entlastung entnommen werden.
- ◇ Zu beachten ist, dass nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden. Die Matratze wird sonst durchgelegen, und die druckentlastende Wirkung geht verloren.

Technische Daten

12 cm		
Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
KM 1206012	120 x 60 cm	5,2 kg
KM 1407012	140 x 70 cm	7,0 kg
KM 1607012	160 x 70 cm	8,0 kg
KM 1909012	190 x 90 cm	12,3 kg
KM 2009012	200 x 90 cm	12,9 kg
KM 20010012	200 x 100 cm	14,3 kg

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge

	12 cm
Auflage – Oberseite	Raumgewicht 45 kg/m ³ in der Stauchhärte 1,6 kPa
Würfelenunterbau	PU-Schaumstoff grau, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 4,0 kPa
Randzonen-Würfel	PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa
Bezug	Anti-Allergiebezug aus Baumwollmischgewebe