

## Reinigungs- und Pflegehinweise für das KUBIVENT Arthro Kissen

<b>Bezug</b> (bzw. Unterbezug)	waschbar bei trocknergeeignet	60 °C ja
<b>Inkontinenz-Schutzbezug</b> (optional)	kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar trocknergeeignet	ja ja

## Garantienachweis



Für das KUBIVENT-Produkt: \_\_\_\_\_

mit der Produkt-Nummer: \_\_\_\_\_

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn.  
Die 2-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

\_\_\_\_\_  
Datum/Stempel/Unterschrift

## KUBIVENT Arthro

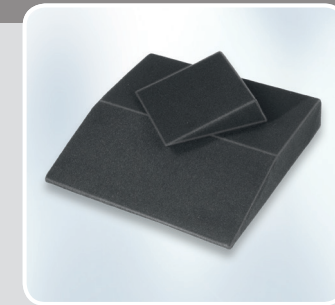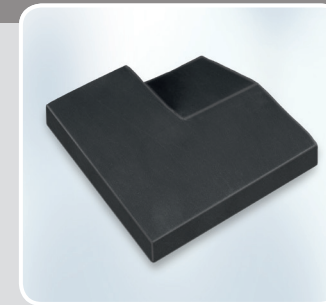

Made  
in  
Germany

## Arthrodesenkissen mit variablem oder festem Keil

### Indikation

Arthrodesenkissen sind eine optimale schmerzreduzierende Sitzhilfe nach operativen Versteifungen, bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, wie auch nach Totalendoprothese oder Umstellungsosteotomien. Empfehlenswert sind Arthrodesenkissen zudem bei allen prophylaktischen Maßnahmen und konservativen Behandlungsmethoden im Zusammenhang mit Hüftproblemen.

### Allgemeine Hinweise

#### Inkontinenz:

Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenz-Schutzbezug verwendet werden. Diese werden von KUBIVENT in allen Größen als Zubehör angeboten.

#### Decubitus:

Bei Decubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir unsere Anti-Decubitus-Kissen (siehe KUBIVENT Decubitus-Prospekt).


#### Risiko-Hinweis:

Rauchen und offenes Feuer in unmittelbarer Nähe des Kissens ist zu vermeiden.


### Technische Daten

Hilfsmittel-Nr.	26.46.01.0008
Größe in cm (SB x ST x H)	Bestell-Nr.
40 x 40 x 8-0,5	ADK-40*
43 x 43 x 8-0,5	ADK-43*

\* je nach Platzierung des Keileinschnittes ergänzt um  
-R (Einschnitt rechts), -L (links), -B (beidseitig), -V (variabel)

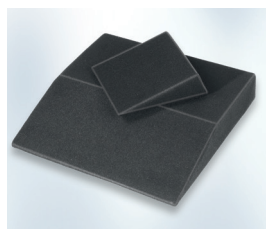

Ausführung 'Vario'

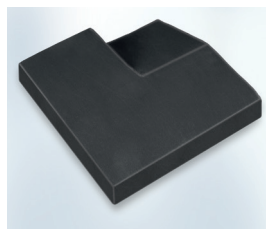

Ausführung 'Fest'

### Produkteigenschaften

Der PU-Schaum ist so abgestimmt, dass während des Sitzens das Profil des Kissens stabil bleibt, sich aber noch ausreichend an die Anatomie des Anwenders anschmiegt, damit ein funktionell bequemes Sitzen gewährleistet ist.

Die Vario-Kissen erlauben durch den abnehmbaren Frontkeil eine Links-/Rechts- oder beidseitige Anwendung und sind somit flexibel einsetzbar.

### Reinigungs- und Pflegehinweise

Der zum Lieferumfang gehörende Bezug kann problemlos bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen und anschließend bei schwacher Temperatur im Wäschetrockner getrocknet werden.

### Herstellung und Vertrieb

Das KUBIVENT **Arthro** Arthrodesenkissen wird ausschließlich von der Firma Kubivent GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Ausführung 'Fest'	Ausführung 'Vario'
Einsatzbereich: bis 140 kg Körpergewicht	Einsatzbereich: bis 140 kg Körpergewicht
Material: Einschichtiger PU-Schaumstoffkern	Material: Einschichtiger PU-Schaumstoffkern
Bezug: Baumwolle schwarz mit Anti-Slip	Bezug: Velourbezug schwarz mit Anti-Slip