

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

**Neben der Matratze ist eine ganz wesentliche pflegerische Maßnahme wichtig:
Das richtige Positionieren des Patienten.**

Wer länger liegt, muss richtig liegen, immer wieder umgelagert sowie beim Sitzen und Essen stabilisiert werden.

Mit KUBIVENT PurplePos haben wir dafür ein ganz spezielles, völlig neues Programm entwickelt.

Es ist auch für pflegende Angehörige eine leicht zu handhabende Hilfe:
Denn nur zwei Kissen-Formen schaffen das, wozu bisher eine Vielzahl davon nötig war.

Lassen Sie sich dazu von Ihrem Sanitätsfachhändler, der Ihnen die Matratze geliefert hat, genauer informieren. Er wird Ihnen darüber hinaus auch gerne Tipps geben, wie Sie mit der für Sie ungewohnten Situation eines zu pflegenden Angehörigen besser fertig werden.



45°-Positionierung

A-Positionierung,
liegendIndividuell modellierbar
bei hoher Formstabilität

KUBIVENT ViscoComfort



**Kaltschaum-Matratze mit
viscoelastischer Liegefläche**

Prophylaxe
+ Therapie

Braden
allgemein – hoch

Made
in
Germany

Sie haben sich für eine Pflegematratze mit einem 'Plus an Komfort' entschieden, deren Stärke sich im Zusammenspiel von viscoelastischer Liegefläche und der ausgezeichneten Elastizität des Kaltschaums (Trägerschicht) auszeichnet. Bitte beachten Sie für Einsatz und Handhabung die folgenden Informationen.

Indikationen und Einsatzbereiche

Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie

- ◇ bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Patienten

- ◇ bei denen sich eine Decubitus-Prophylaxe durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- ◇ die zusätzlich zur Weichlagerung in ihrer Liegeposition stabilisiert werden sollen
- ◇ die eine besonders weiche Auflagefläche benötigen (z.B. bei Osteoporose, Skoliose)
- ◇ bei denen ein bereits abgeheilter Decubitus nachbehandelt werden soll
- ◇ die neben der medizinischen Wirkung auch das ‚Plus an Komfort‘ schätzen

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal vor Ort eingeschätzt werden.

Gewichtseinschränkung

- ◇ Die Matratze kann grundsätzlich bei Patienten mit einem Körpergewicht bis 160 kg – aber nicht darüber – eingesetzt werden.
- ◇ Nach unten gibt es keine Gewichtsbeschränkungen.

Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Matratze. Nur so kann vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratze durchgelegen wird.

Einsatz der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche

Bei Patienten – die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen – muss darauf geachtet werden, dass die Matratze nicht durchgesessen wird. Sollte dies der Fall sein – vor allem bei Patienten mit höherem Körpergewicht – sollte im Zweifelsfall eine härtere bzw. höhere Matratze eingesetzt werden.

Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern

Aufgrund der Matratzenhöhe von 15 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keinerlei Einschränkungen vorhanden.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

- ◇ **Allergien**
Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoff-Allergien eingesetzt werden.
- ◇ **Gewichtsbeschränkungen**
Bitte beachten Sie unbedingt die oben angegebene Gewichtsbeschränkung für die Matratze.

Sachgerechte Anwendung




- ◇ Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet.
- ◇ Die Matratze wird so ins Bett gelegt, dass sich die viscoelastische Schicht (3 cm) auf der Oberseite der Matratze befindet und somit die Liegefläche bildet. Beachten Sie dazu bitte die am Matratzenbezug angebrachte Kennzeichnung.

Wirkungsweise

- ◇ Durch die viscoelastische Liegefläche der Matratze wird eine optimale Anpassung an den Körper und die jeweilige Liegeposition erreicht, der Auflagedruck wird minimiert.
- ◇ Der viscoelastische Schaumstoff reagiert auf Körperwärme und -gewicht, passt sich somit jeder Körperform ideal an.
- ◇ Hervorstehende Partien wie Schultern, Hüfte und Fersen können tiefer einsinken, dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Druckverteilung.

- ◇ Kaltschaum reagiert schnell und gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt.
- ◇ Das Zusammenspiel aus Visco- und Kaltschaum mit einer Matratzen-Gesamthöhe von 15 cm sorgt für das ‚Mehr an Komfort‘.

Technische Daten

	3 cm		mit Frottee-Bezug mit 4-seitigem Reißverschluss	mit Baumwollbezug hellblau mit Reißverschluss	
	12 cm	Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Gewicht in kg
		190 x 90 x 15	VKM152-FR	VKM152-BW	10,7
		200 x 90 x 15	VKM153-FR	VKM153-BW	11,3
		200 x 100 x 15	VKM154-FR	VKM154-BW	12,5
		200 x 120 x 15	VKM155-FR	VKM155-BW	14,9
		200 x 140 x 15	VKM156-FR	VKM156-BW	17,3

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich
Höhe	2 Schichten	0 – 160 kg
15 cm		

Verwendete Materialien für Matratze und Bezüge

Für den Matratzenkern werden folgende Schaumstoffe verwendet:	
Liegefläche:	3 cm Viscoschaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 3,0 kPa
Trägerschicht:	12 cm HR-Schaum (Kaltschaum), Raumgewicht 40 kg/m ³ , Stauchhärte 3,0 kPa
Bezug:	Baumwollbezug hellblau oder wahlweise abgesteppter Frottee-Bezug

Reinigungs- und Pflegehinweise

Komplettreinigung	Spezialreinigung durch KUBIVENT	ja
	Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)	nein
	Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)	ja
Baumwollbezug	Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen	ja
	waschbar bei 60 °C	ja
	trocknergeeignet	ja
Frottee-Bezug	waschbar bei 60 °C	ja
	trocknergeeignet	nein

Reinigung der ViscoComfort-Matratze durch KUBIVENT

Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplett gereinigt werden. Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!