

**Garantienachweis**

Für das KUBIVENT-Produkt: \_\_\_\_\_

mit der Produkt-Nummer: \_\_\_\_\_

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

\_\_\_\_\_  
Datum/Stempel/Unterschrift

**Neben der Matratze ist eine ganz wesentliche pflegerische Maßnahme wichtig:  
Das richtige Positionieren des Patienten.**

Wer länger liegt, muss richtig liegen, immer wieder umgelagert sowie beim Sitzen und Essen stabilisiert werden.

Mit KUBIVENT PurplePos haben wir dafür ein ganz spezielles, völlig neues Programm entwickelt.

Es ist auch für pflegende Angehörige eine leicht zu handhabende Hilfe:  
Denn nur zwei Kissen-Formen schaffen das, wozu bisher eine Vielzahl davon nötig war.


Lassen Sie sich dazu von Ihrem Sanitätsfachhändler, der Ihnen die Matratze geliefert hat, genauer informieren. Er wird Ihnen darüber hinaus auch gerne Tipps geben, wie Sie mit der für Sie ungewohnten Situation eines zu pflegenden Angehörigen besser fertig werden.



45°-Positionierung

A-Positionierung,  
liegendIndividuell modellierbar  
bei hoher Formstabilität

# KUBIVENT ConformPlus

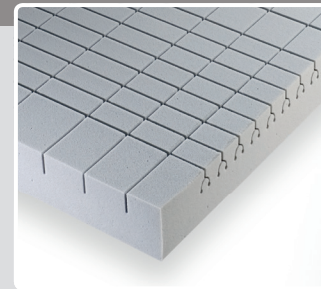

**Kaltschaum-Matratze mit tief  
eingeschnittenem Luft-Kanalsystem**

Prophylaxe  
+ Therapie

Braden  
allgemein – hoch

5-Zonen-  
Prinzip

Made  
in  
Germany

Sie haben sich für eine Pflegematratze mit einem ‚Plus an Komfort‘ entschieden, die sich durch eine 14 cm hohe Kaltschaumschicht mit tief eingeschnittenem ‚Luft-Kanalsystem‘ auszeichnet. Bitte beachten Sie für Einsatz und Handhabung die folgenden Informationen.

### Indikationen und Einsatzbereiche

Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie

- ◇ bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Patienten

- ◇ bei denen sich eine Decubitus-Prophylaxe durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt.
- ◇ bei denen ein bereits abgeheilter Decubitus nachbehandelt werden soll.
- ◇ die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fußtief Lagerung.)
- ◇ bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist.
- ◇ bei denen Druckstellen vorgebeugt werden soll.
- ◇ bei denen eine Scherkräftminimierung erforderlich ist.
- ◇ die neben der medizinischen Wirkung auch das ‚Plus an Komfort‘ (Matratzenhöhe) schätzen

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze von geschultem Fachpersonal vor Ort eingeschätzt werden.

### Gewichtseinschränkung

- ◇ Die Matratze kann grundsätzlich bei Patienten mit einem Körpergewicht bis 140 kg – aber nicht darüber – eingesetzt werden.
- ◇ Nach unten gibt es keine Gewichtsbeschränkungen.

### Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

- ◇ **Allergien**  
Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoff-Allergien eingesetzt werden.
- ◇ **Gewichtsbeschränkungen**  
Bitte beachten Sie unbedingt die oben angegebene Gewichtsbeschränkung für die Matratze. Nur so kann vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratze durchgelegen wird.

### Einsatz der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche

Bei Patienten – die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen – muss darauf geachtet werden, dass ein Gewicht von ca. 80 kg nicht überschritten wird, damit die Matratze nicht durchgesessen wird. Bei Patienten mit höherem Körpergewicht sollte im Zweifelsfall eine härtere bzw. höhere Matratze eingesetzt werden.

### Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern

Aufgrund der Matratzenhöhe von 14 cm ist beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keinerlei Einschränkung vorhanden.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist.

Empfehlenswert ist auch der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.


### Sachgerechte Anwendung

- ◇ Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet.
- ◇ Die Matratze wird so ins Bett gelegt, dass die Würfelschnitte nach oben gerichtet sind. Beachten Sie dazu bitte die am Matratzenbezug angebrachte Kennzeichnung.

### Wirkungsweise

- ◇ Durch den verwendeten HR-Schaumstoff (HR = High Resilient = hochelastisch) wird eine hohe Punktelastizität gewährleistet, die die Grundlage für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition bildet. Der Auflagedruck, Hauptursache für die Entstehung von Decubiti, wird so auf ein Minimum reduziert.
- ◇ Unterstützt wird dies noch durch die ergonomisch angeordneten Würfelschnitte, durch die auch potenzielle Scherkräfte beim Umlagern minimiert werden.
- ◇ Neben seiner hohen Elastizität zeichnet sich der verwendete HR-Schaumstoff auch durch eine sehr offene-porige Struktur aus. In Kombination mit den würfelförmigen Einschnitten in der Liegefläche wird so eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Ein Wärme- und Feuchtigkeitsstau kann so vermieden werden.

### Technische Daten

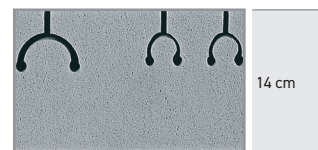

Frottee-Bezug mit 4-seitigem Reißverschluss  
Inko-Bezug blau geschlossen mit Reißverschluss

Größe in cm	mit Frottee-Bezug mit 4-seitigem Reißverschluss		mit Inko-Bezug	
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Gewicht in kg
190 x 90 x 14	CFM142-F	CFM142-I		10,1
200 x 90 x 14	CFM143-F	CFM143-I		10,6
200 x 100 x 14	CFM144-F	CFM144-I		11,8
200 x 120 x 14	CFM145-F	CFM145-I		14,1
200 x 140 x 14	CFM146-F	CFM146-I		16,5

### Matratzen-Aufbau

Höhe	1 Schicht	5 Zonen	Einsatzbereich
14 cm			0 – 140 kg Empfohlen 0 – 110 kg

### Materialien für Matratze und Bezüge

Matratzenkern:	Kaltschaum (HR-Schaum), Raumgewicht 45 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte 3,5 kPa
Bezug:	Frottee- oder Inkontinenz-Bezug

### Reinigungs- und Pflegehinweise

Komplettreinigung	Spezialreinigung durch KUBIVENT	ja
	Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)	nein
	Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)	ja
Frottee-Bezug	Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen	ja
	waschbar bei 60 °C	ja
Inkontinenz-Schutzbezug	trocknergeeignet	nein
	kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar	ja
	trocknergeeignet	ja

### Reinigung der ConformPlus-Matratze durch KUBIVENT

Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplett gereinigt werden. Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!