

Zu beachten:

Verwenden Sie nur VAH- oder RKI-gelistete Desinfektionsmittel, die für die angegebenen Materialien geeignet sind, s. www.vah-online.de/ oder www.rki.de. Beachten Sie bei der Anwendung die Sicherheits- und Anwendungshinweise der jeweiligen Desinfektionsmittelhersteller.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Hygienische Aufbereitung der DuoSan-Matratze durch KUBIVENT

Zusätzlich bietet die Firma Kubivent für den Matratzenkern eine Komplettreinigung an. Hierbei wird die Matratze in einem Dampfverfahren hygienisch aufbereitet.

Die Hygienische Aufbereitung darf nur vom Hersteller vorgenommen werden, da sonst jegliche Garantiesprüche verfallen..

Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz / Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Matratze ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings entweder die Verwendung eines geschlossenen und bakteriendichten Inkontinenzschutzbezug der entsprechend gereinigt und desinfiziert werden muss, oder aber eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Matratze.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181-47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent DuoSan-Matratzen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

CE Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____


mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.


Datum/Stempel/Unterschrift

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT DuoSan

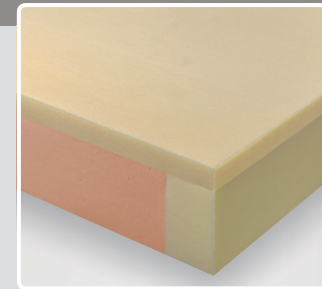

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Visco-/Kaltschaum-Matratze mit Randverstärkung



Prophylaxe + Therapie

Braden allgemein - hoch



Indikationen und Einsatzbereiche

Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie

- ◇ bei bereits bestehenden Decubiti bis Stadium III
- ◇ bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Patienten

- ◇ bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Decubitus-Prophylaxe bzw. Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- ◇ als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Decubitus
- ◇ bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist

Anwendungseinschränkungen

- ◇ Die Matratze kann grundsätzlich bei Patienten mit einem Körpergewicht bis 160 eingesetzt werden.
- ◇ Nach unten gibt es keine Gewichtsbeschränkungen.

Verwendung der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche

Bei Patienten die aufgrund Ihrer Erkrankung / Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen muss darauf geachtet werden, daß die Matratze nicht durchgesessen wird. Sollte dies der Fall sein – vor allem bei Patienten mit höherem Körpergewicht – sollte im Zweifelsfall eine härtere bzw. höhere Matratze eingesetzt werden.

Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern

Aufgrund der Matratzenhöhe von 15 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keinerlei Einschränkungen vorhanden. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

- ◇ **Allergien**
Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.
- ◇ **Inkontinenz**
Die Matratze ist standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgestattet.

Sachgerechte Anwendung

- ◇ Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet.
- ◇ Die Matratze wird so ins Bett eingelegt, dass sich die viscoelastische Schicht (3 cm) auf der Oberseite der Matratze befindet und somit die Liegefläche bildet.
- ◇ Die Trägerschicht mit der Randzonenverstärkung sollte nach unten weisen. An dem Bezug ist dies zudem an der Reißverschlussleiste erkennbar. Diese muss den Reißverschluss von oben nach unten verdecken.

Technische Daten



mit Polyester- und Inko Bezug

Hm-Nr: 11.29.05.0055	Artikel-Nr.	Gewicht in kg
Größe in cm		
190 x 90 x 15	DSM152	10,7
190 x 100 x 15	DSM1517	11,8
200 x 90 x 15	DSM153	11,3
200 x 100 x 15	DSM154	12,5
200 x 120 x 15	DSM155	14,9
200 x 140 x 15	DSM156	17,3

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich	Testergebnisse				
Höhe 15 cm	2 Schichten	0 – 160 kg	Empfohlen 0 – 140 kg	Bei 80 kg = 23%	Bei 120 kg = 17%	Bei 160 kg = 16%	rF = 63,75%

Materialien für Matratze und Bezüge

Für den Matratzenkern werden folgende Schaumstoffe verwendet:	
Liegefläche:	3 cm Viscoschaum, Raumgewicht 50/m ³ , Stauchhärte 3,0 kPa
Unterbau:	12 cm HR-Schaum (Kaltschaum), Raumgewicht 40 / m ³ , Stauchhärte 3,0 kPa
Randzonenverstärkung unterfüttert:	PUR-Schaum Raumgewicht 50/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa
Bezug:	Polyesterbezug
Inkontinenzbezug:	PU-beschichtetes Polyestergewebe

Reinigungs- und Desinfektionshinweise

Bezüge:

Mit dem Reinigen und Desinfizieren der Matratze sind in der Regel die Bezüge gemeint.

Reinigung: Beide Bezüge können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel verwenden. Beide Bezüge verfügen über einen Reißverschluss, sind abnehmbar und können auch in der Waschmaschine gewaschen werden. Der Polyesterbezug kann bei max. 60 °C und der kochfeste Inkontinenzschutzbezug bei max. 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Desinfektion: Beide Bezüge können mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel wischdesinfiziert oder durch Zugabe eines handelsüblichen Desinfektionswaschmittels in der Waschmaschine desinfiziert werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie den Bezug an der Luft trocknen.

Matratze:

Reinigung: Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet, kann aber mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel abgewischt werden.

Desinfektion: Der Matratzenkern kann mit einem geeigneten, handelsüblichen Desinfektionsmittel wischdesinfiziert werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie die Matratze an der Luft trocknen.