

Reinigungs- und Pflegehinweise für das KUBIVENT Cubus Kissen

Einzelne Würfel waschen	Waschmaschine bis 60 °C	ja
Komplettreinigung	Spezialreinigung durch KUBIVENT	nein
	Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)	ja
	Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)	ja
	Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen	ja
Bezug (bzw. Unterbezug)	waschbar bei	95 °C
	trocknergeeignet	ja
Inkontinenz-Schutzbezug (teilweise nur optional erhältlich)	kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar	ja
	trocknergeeignet	ja

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift



KUBIVENT Cubus



Würfel-Kissen



Therapie +
Prophylaxe

Braden
allgemein - hoch



Indikationen und Einsatzbereiche

Der Einsatz der Kissen unterstützt die Prophylaxe und Therapie

- ◇ bei Patienten die mind. 1 Stunde am Tag im Rollstuhl sitzen und bei denen ein allgemeines bis hohes Decubitus-Risiko besteht (nach Braden).

Anwendungseinschränkungen

- ◇ Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden.
- ◇ Beim Einsatz der Kissen sind die **Gewichtsvorgaben unbedingt zu beachten**:

Höhe/ Ausführung	8 cm	8 cm/FEST	6 cm	6 cm/FEST	5 cm	5 cm/FEST
Einsatzbereich	50 – 90 kg	50 – 120 kg	bis 60 kg	über 60 kg	bis 50 kg	über 50 kg

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

- ◇ **Allergien**
Die Kissen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.
- ◇ **Inkontinenz**
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden auch als Zubehör in den passenden Größen angeboten. Fragen Sie einfach Ihren Fachhändler vor Ort. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das Kissen einmal feucht werden, können die betroffenen Würfel einfach entnommen und gereinigt werden (siehe 'Reinigungshinweise').
- ◇ **Gewichtsbeschränkungen**
Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen. Nur so kann vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten das Kissen durchgesessen wird und bei zu leichten Patienten das Kissen zu hart ist.

Sachgerechte Anwendung und Wirkungsweise

- ◇ Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, aber auch auf Sesseln oder Stühlen geeignet.
- ◇ Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (ggf. z.B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls).
- ◇ Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass die aufgenähte Anti-Slip-Einlage nach unten zeigt.
- ◇ Durch die Aufteilung der Sitzfläche in ca. 50 x 50 mm große Teilflächen und die flexible Verbindung dieser einzelnen Elemente durch das spezielle Haltegitter kann eine optimale Anpassung der Auflagefläche erreicht werden, der Auflagedruck wird so minimiert.



8 cm - einschichtig



8 cm/FEST - einschichtig



6 cm - einschichtig



6 cm/FEST - einschichtig



5 cm - einschichtig



5 cm/FEST - einschichtig

Technische Daten

8 cm	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3030		
Art.-Nr.	cm	kg
R 81	35 x 35	0,8
R 82	35 x 40	0,9
R 810	35 x 45	1,0
R 83	40 x 40	1,0
R 84	40 x 45	1,2
R 85	45 x 45	1,3
R 86	45 x 50	1,4
R 87	50 x 50	1,6

8 cm/Fest	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3030		
Art.-Nr.	cm	kg
R 81-09	35 x 35	0,8
R 82-09	35 x 40	0,9
R 810-09	35 x 45	1,0
R 83-09	40 x 40	1,0
R 84-09	40 x 45	1,2
R 85-09	45 x 45	1,3
R 86-09	45 x 50	1,4
R 87-09	50 x 50	1,6

6 cm	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3029		
Art.-Nr.	cm	kg
S 615	35 x 35	0,6
S 67	35 x 40	0,6
S 612	35 x 45	0,7
S 61	40 x 40	0,7
S 62	40 x 45	0,8
S 63	45 x 45	0,9
S 64	45 x 50	1,0
S 65	50 x 50	1,2

6 cm/Fest	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3029		
Art.-Nr.	cm	kg
S 615-09	35 x 35	0,6
S 67-09	35 x 40	0,6
S 612-09	35 x 45	0,7
S 61-09	40 x 40	0,7
S 62-09	40 x 45	0,8
S 63-09	45 x 45	0,9
S 64-09	45 x 50	1,0
S 65-09	50 x 50	1,2

5 cm	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3028		
Art.-Nr.	cm	kg
S 515	35 x 35	0,5
S 57	35 x 40	0,6
S 512	35 x 45	0,7
S 51	40 x 40	0,7
S 52	40 x 45	0,7
S 53	45 x 45	0,8
S 54	45 x 50	0,9
S 55	50 x 50	1,0

5 cm/Fest	Größe	Gewicht
HM-Nr. 11.11.01.3028		
Art.-Nr.	cm	kg
S 515-09	35 x 35	0,5
S 57-09	35 x 40	0,6
S 512-09	35 x 45	0,7
S 51-09	40 x 40	0,7
S 52-09	40 x 45	0,7
S 53-09	45 x 45	0,8
S 54-09	45 x 50	0,8
S 55-09	50 x 50	1,0

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge

	5, 6, 8 cm	5, 6, 8 cm/FEST
Sitzfläche	PU-Schaumstoff grau, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 4,0 kPa	PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 6,0 kPa
Bezug	100 % Trevira CS	