

## Reinigungs- und Pflegehinweise

### Baumwollbezug:

Die zusätzlichen Baumwollbezüge können bei 60 °C gewaschen und anschließend bei schwacher Temperatur im Wäschetrockner getrocknet werden

### Reinigung der Positionierungshilfen:

Die Positionierungshilfen selbst sind nicht waschbar, können aber mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und sind somit schnell wieder einsetzbar. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel verwenden.

### Desinfektion:

Die Positionierungshilfen können mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Beispielsweise durch Wischdesinfektion, bei der das Desinfektionsmittel mittels geeigneter Reinigungsutensilien durch Wischen aufgebracht wird.

### Sicherheitshinweise

Es ist darauf zu achten, dass die Kissen nicht die Atemwege blockieren. Kubivent Positionierungshilfsmittel können auch in Betten mit verstellbarer Liegefläche verwendet werden.

In Betten mit Seitengittern muss die Lagerung so erfolgen, dass Verletzungen oder einem Herausfallen der Person durch korrekte Positionierung entgegengewirkt wird. Alle Kissen mit dem standardmäßigen Inko-Schutzbezug sind schwer entzündbar nach DIN 5971-2. Der im Lieferumfang enthaltene Baumwollbezug ist nicht schwer entzündbar. Rauchen und das Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.

### Herstellung und Vertrieb

Kubivent Positionierungshilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

### Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: \_\_\_\_\_

mit der Produkt-Nummer: \_\_\_\_\_

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT®

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme  
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach  
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 071 81 / 47 50 6 - 99  
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 07/2018

## Gebrauchsanleitung

# KUBIVENT PurplePos



Kissen PhysiForm




Kissen VariMed



Handkissen



Rolle

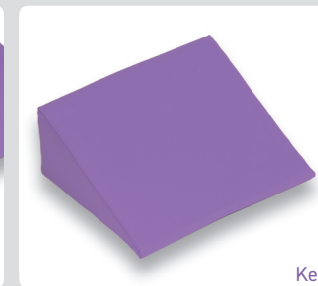

Keil



Keilkissen XS



Prophylaxe  
+ Therapie

Braden  
allgemein



KUBIVENT®

## Produkt-Beschreibung

Die Kubivent Positionierungshilfen PurplePos gibt es in unterschiedlichen Formen, Größen und Füllungen

- **Kissen PhysiForm:**  
40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 70 x 50 cm
- **Kissen VariMed:**  
180 x 35 cm, 220 x 35 cm, 250 x 35 cm
- **Handkissen:**  
14 x 11 cm

Mit Mikroperlen-System



- **Halbrolle:** 25 x 12 x 7,5 cm
- **Keil:** 25 x 20 x 10-1 cm
- **Keilkissen XS:** 50 x 11 x 6 cm

Mit Sandwich-System



### Bezüge

Alle Positionierungskissen sind mit einem geschlossenen, vollvernähten Inko-Bezug (Lila), ohne Reißverschluss ausgestattet.

Für jede Positionierungshilfe (außer Handkissen) gibt es einen zusätzlichen Baumwollbezug in unterschiedlichen Farben mit verdecktem Reißverschluss.

Das Handkissen verfügt über einen zusätzlichen Hygiene-Bezug. Alle zusätzlichen Bezüge sind im Standardlieferungsumfang enthalten.



### Indikation

Die Kubivent Positionierungshilfen unterstützen die Positionierung, z. B. bei Decubitus gefährdeten und betroffenen Personen. Durch ihren Einsatz können gefährdete bzw. betroffene Körperzonen mittels einer Umpositionierung entlastet oder freigelagert werden. Die Körperwahrnehmung und das Wohlbefinden werden dabei positiv unterstützt.

Die individuell einsetzbaren Hilfsmittel können für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionsunterstützungsarten eingesetzt werden wie für:

- Mikropositionierung
- 30°-Seitenpositionierung
- 130°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung
- Nestchen-Positionierung
- Positionierung des Kopfes
- Positionierung von Extremitäten
- Langsitz
- Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen

Das individuelle Krankheitsbild muss dabei unbedingt beachtet werden!

### Kontraindikation

Kontraindikationen sind nicht bekannt. Aber auch hier gilt: Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

## Anwendung



### Kissen VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in verschiedene individuelle Formen bringen. Die Füllung kann zusätzlich bequem und einfach durch kreisende Handbewegung verteilt werden. Durch die feinen Mikroperlen im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren. Je nach Bedarf kann das Kissen für die individuelle Positionsunterstützung angewandt werden.



### Kissen PhysiForm

Quadratische bzw. rechteckige Universalkissen. Je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung anzuwenden. Das Kissen in der Größe 70 x 50 cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung. Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden. Optisches Unterscheidungsmerkmal: Weißer Bezug.



### Halbrolle

Optimal für die Fersenfreilagerung und zur individuellen Positionsunterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.



### Keil

Geeignet zur Mikrolagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern wurde an jeder Seite mit einem weicherem Kaltschaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.



### Keilkissen XS

Empfiehlt sich zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Zur Druckentlastung oder Freilagerung an schwer zugänglichen Bereichen der Beine, z. B. bei Kontrakturen.



### Handkissen

Durch die Mikroperlen-Füllung individuell modellierbar. Eignet sich optimal für die Positionierung der leicht geöffneten Hand. Der abnehmbare Hygiene-Bezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar.

## Technische Daten

Produkt	Größe in cm	Hilfsmittel-Nr.	PZN	Artikel-Nr.	Füllung
VariMed	180 x 35	11.11.05.2006	12548312	PKVM180	Mikro-Perlen
VariMed	220 x 35	11.11.05.2006	12548329	PKVM220	Mikro-Perlen
VariMed	250 x 35	11.11.05.2006	12548335	PKVM250	Mikro-Perlen
PhysiForm	40 x 40	11.11.05.0033	12548424	PKPF40	Mikro-Perlen
PhysiForm	60 x 40	11.11.05.0033	12548447	PKPF60	Mikro-Perlen
PhysiForm	70 x 50	11.11.05.0033	12548298	PKPF70	Mikro-Perlen
PhysiForm 'Kopfkissen'	70 x 50	11.11.05.0033	12548306	PKPF70K	Mikro-Perlen
Handkissen	14 x 11		12548358	PKHK	Mikro-Perlen
Keil	25 x 20 x 10-1	11.11.05.1026	12548418	PKKL	Kaltschaum RG*55 + PU-Schaum RG*60
Halbrolle	25 x 12 x 7,5	11.11.05.1024	12548364	PKHR	Kaltschaum RG*55 + PU-Schaum RG*60
Keilkissen XS	50 x 11 x 6	11.11.05.1025	12548341	PKXSK	Kaltschaum RG*55 + PU-Schaum RG*60

\*RG = Raumgewicht