

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

**KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN
DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT**

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT Arthrodesenkissen (Arthro) werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

**SPEZIAL-KISSEN**

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Arthro

PU-Schaumkissen mit variablem oder festem Keileinschnitt



KUBIVENT®
sitzen · liegen · positionieren

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT Arthrodesenkissen** ist eine optimale und schmerzreduzierende Sitzhilfe,

- für die Entlastung im Hüftbereich nach operativen Versteifungen und
- bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, wie auch nach Umstellungsosteotomien.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Empfehlenswert ist das Arthrodesenkissen bei allen prophylaktischen Maßnahmen und konservativen Behandlungsmethoden im Zusammenhang mit Hüftproblemen. Die Sitz- und Oberschenkelaufgeläufigkeiten sind einseitig oder beidseitig abgelenkt. Dadurch wird der Sitzwinkel geöffnet und eine Entlastung für den Hüftbereich der betroffenen Körperseite unterstützt. Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl oder auch sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.

Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Sitzens bei Schädigung der Hüft- oder Kniegelenke mit schwerer Einschränkung der Beugung im Hüft- und/oder Kniegelenk, wenn handelsübliche Kissen/Keilkissen nicht ausreichend sind und zur Einhaltung einer möglichst physiologischen und schmerzfreien Sitzposition.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Nach Implantation einer Totalendoprothese ist in der Regel eine Versorgung mit einem Arthrodesensitzkissen nicht erforderlich.

Allergien

Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz

Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus

Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Kissen.

Gewichtsbeschränkungen

Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Ausführung	Vario	mit festem Keil
Einsatzbereich	bis 140 kg	bis 140 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen (z. B. *Anpassung der Armstützen des Rollstuhls*). Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass der Keileinschnitt nach oben und vorne weist. Die Unterseite des Bezugs ist an dem rutschhemmenden Anti-Slip-Streifen zu erkennen. Die Vario-Kissen erlauben durch den abnehmbaren Frontkeil eine links-/rechts- oder beidseitige Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt **Arthro** mit festem Keil



Querschnitt **Arthro** mit variablem Keil

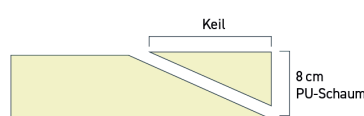

Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

¹⁾ Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Kissengrößen und Gewichte			
HMV-Nr. 26.46.01.0008			
Artikel-Nr.	Größe	Gewicht	Keileinschnitt
ADK - 40R	40 x 40 x 8 – 0,5 cm	0,8 kg	rechts
ADK - 40L			links
ADK - 40B			beidseitig
ADK - 40V			variabel
ADK - 43R			43 x 43 x 8 – 0,5 cm
ADK - 43L	links		
ADK - 43B	beidseitig		
ADK - 43V	variabel		

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge	
PU-Schaum	PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m ³ , Stauchhärte 8,0 kPa
Bezug Arthro	100 % Baumwolle
Bezug Arthro Vario	100 % Polyester / Velourbezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion der Kissen erfolgt regelmäßig mit dem Abnehmen und Waschen bzw. Desinfizieren des Bezuges. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz der Kissen sollte der Kissenkern/der Bezug vollständig trocknen.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Kissenkern

- Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
- Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Kissenbezug

Waschmaschine:

- waschmaschinengeeignet, waschbar bei 60°C,
- Desinfektion mit Desinfektionsvollwaschmittel möglich,
- wäschetrocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den Bezug aufgetragen und wirkt ein. Bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mithilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter www.kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Arthrodesenkissen mit Baumwollbezug	Arthrodesenkissen Variante Vario mit Velourbezug
1x Arthrodesenkissen (Kissenkern)	1x Arthrodesenkissen (Kissenkern)
1x Baumwollbezug (abnehmbar)	1x Velourbezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung