

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

PurplePos Fersenschuh
1x PurplePos Fersenschuh
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB



KUBIVENT PurplePos Fersenschuhe werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH**, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die **KUBIVENT PurplePos Fersenschuhe** sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.



PurplePos Positionierungskissen

Gebrauchsanleitung KUBIVENT PurplePos Fersenschuh

Fersenschuh mit Mikroperlenfüllung



KUBIVENT.
sitzen · liegen · positionieren

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Der **KUBIVENT PurplePos Fersenschuh** unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie bei Personen,

- mit bereits bestehenden Dekubiti und
- die durch dauerhaftes Liegen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein allgemeines bis hohes Dekubitus-Risiko (nach Braden) haben.

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Fersenschuhs besonders bei Patienten,

- bei denen die Ferse gezielt entlastet werden soll,
- bei denen die Ferse frei gelagert werden muss,
- bei denen eine gute Druckverteilung im Bereich der Ferse erforderlich ist und
- bei denen die Knöchel entlastet werden müssen (*Seitenlage*).

Grundsätzlich sollte der Einsatz des Fersenschuhs von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Der Fersenschuh dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (*durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung*) mit drohender und manifester Druckschädigung der Haut und Unterhaut (*Dekubitus/Druckgeschwür*) an den Extremitäten, wenn eine Lagerung der Extremität ohne Unterstützung nicht möglich ist, zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses. Produkte zur Freilagerung können aufgrund der Gefahr eines Fensterödems meist nur kurzzeitig eingesetzt werden und bedürfen daher einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung und Verlaufsbeobachtung.¹⁾

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Der Fersenschuh ist nicht für das Gehen geeignet. Beim Gehen mit dem Fersenschuh besteht ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko.

Personen die stark schwitzen, sollten direkten Hautkontakt mit dem Inkontinenzschutzbezug, beispielsweise durch das Tragen von Baumwollsocken, vermeiden.

Um Feuchtigkeitstau zu vermeiden, wird das Tragen von Socken empfohlen.

Vor dem Transfer vom/aus dem Bett in den Rollstuhl sollte der Fersenschuh vom Fuß entfernt und erst nach dem sicheren Transfer wieder eingesetzt werden.

VERWENDUNG DES PRODUKTES IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Der KUBIVENT PurplePos Fersenschuh ist uneingeschränkt in Betten mit verstellbarer Liegefläche einsetzbar.

SACHGERECHTE ANWENDUNG


Der KUBIVENT PurplePos Fersenschuh wird für die im pflegerischen Bereich üblichen Positionsunterstützung eingesetzt. Dabei ist ein ärztlich/pflegerisch abgestimmter Behandlungs- und Versorgungsprozess notwendig.

Zur Freilagerung der Ferse wird der Fuß mit dem Fersenbein nach hinten in den Fersenschuh eingelegt. Das umlaufende schwarze Nahtband zeigt die für die Fußsohle vorgesehene Seite. Das Loch auf der Rückseite wird zur Freilagerung der Ferse im Bereich des kranialen Fersensporns ausgerichtet.

Die Lasche mit dem variablen Klettverschluss wird fest über den Spann fixiert, wodurch ein Verrutschen des Fersenschuhs verhindert wird. Die Füllung kann durch kreisende Handbewegungen verteilt werden, um eine optimale Anpassung an den Fuß zu gewährleisten. In Betten mit Seitengittern muss durch die korrekte Positionierung Verletzungen durch Einklemmen oder Herausfallen vorgebeugt werden.

¹⁾Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Freilagerung der Ferse

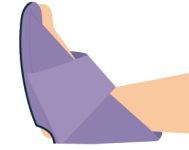

Schematische Illustration eines Fersenschuhs.
Bitte beachten Sie die Anwendungsrisiken und Kontraindikationen (S.1).

TECHNISCHE DATEN

PurplePos Fersenschuh



Schematische Illustration eines Fersenschuhs

HMV-Nr.: 11.11.05.0030

Größen und Gewichte

Artikel-Nr.	Größe Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht
PKFS	25 x 24 x 14 cm	150 g

Verwendete Materialien

Außen	vollvernähtes PU-beschichtetes Polyestergewebe
Innen	vollvernähtes Polyestergewebe mit EPS-Mikropertenfüllung

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Reinigung und Desinfektion des PurplePos Fersenschuhs erfolgt mit dem Waschen bzw. Desinfizieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett.

Verwenden Sie handelsübliche Reinigungsmittel und auf Alkoholbasis hergestellte Desinfektionsmittel. Vor dem Wiedereinsatz des Fersenschuhs sollte der PurplePos Fersenschuh vollständig trocknen.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

PurplePos Fersenschuh

- Der Fersenschuh ist für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet. Waschbar bei 60° C.
- Der Fersenschuh kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Wisch- und Flächendesinfektion:

- Das Desinfektionsmittel wird flächendeckend auf den PurplePos Fersenschuh aufgetragen und wirkt ein. Bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche auf die zu desinfizierende Fläche gebracht werden.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz des PurplePos Fersenschuhs bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Der PurplePos Fersenschuh ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.